

Van alledaags licht naar
levensreddende slimme lamp

Configuratietraining





Doel van de training

Stap voor stap leert u hoe u Nobi's slimme AI-verlichting configureert, volledig afgestemd op uw zorginstelling en haar bewoners.

Zo bereiden we ons samen voor op de volgende fase: uw team trainen om Nobi in hun dagelijkse werk te gebruiken.

Nobi configureren in 6 stappen

- 1 Gebruiker aanmaken
- 2 Bewoners aanmaken
- 3 Licht & geluid configureren
- 4 Escalatieprocedure: configureren & verwerken
- 5 Randapparatuur toevoegen
- 6 Technische meldingen



Sign in

[Forgot password](#)[New family](#)

Voordat we beginnen

Maak kennis met de Nobi Applicatie

In het Nobi dashboard hebben managers en zorgverleners een overzicht van de Nobi-activiteit onder bewoners. In het dashboard activeer en configureer je ook de Nobi-lampen om aan de behoeften van je bewoners te voldoen.

Voor het eerst inloggen?

1. Open de e-mail van Nobi
2. Klik op de URL naar het Nobi dashboard
3. Kies en bevestig je wachtwoord
4. Lees en ga akkoord met de voorwaarden
5. Je bent nu een Nobi gebruiker!

[Ga naar de app](#)



Voordat we beginnen

Structuur van de applicatie



Vestiging

Zorginstelling



Afdeling

2e verdieping, Gesloten afdeling,...



Wooneenheid

Wooneenheid 1



Kamer

Slaapkamer, badkamer,... (hetzelfde als een lamp)

Stap 1

Gebruikers aanmaken



Gebruikers aanmaken

3 soorten gebruikers

Je hebt een gebruikersprofiel nodig om toegang te krijgen tot de applicatie, dit zijn de 3 mogelijke rollen om te gebruiken:



Gebruiker

- Dagelijkse taken:
 - Escalaties ontvangen/afsluiten
 - Afbeeldingen van escalaties analyseren
- Contact opnemen met support



Manager

- Alle functionaliteiten van een gebruiker
- Kan gebruikers aanmaken
- Gegevens toevoegen & bewerken
- Contact opnemen met ondersteuning



Technicus

- Technische meldingen bekijken
- Waarschuwingen ontvangen
- Lampen onboarden/ resetten
- Contact opnemen met ondersteuning

Nieuwe gebruiker aanmaken

Stap 2

Bewoners aanmaken



Bewoners aanmaken

Voordat je een bewoner aanmaakt in de applicatie, zorg ervoor dat je deze twee dingen hebt gedaan:

1. Ondertekende geïnformeerde toestemming


- Zorg ervoor dat de geïnformeerde toestemming van de bewoner is ondertekend voordat je hen toevoegt aan de applicatie

2. Beslis over instellingen van de bewoner

- Vertaal informatie van geïnformeerde toestemming naar instellingen in de app

Een nieuwe bewoner toevoegen

Een bewoner archiveren

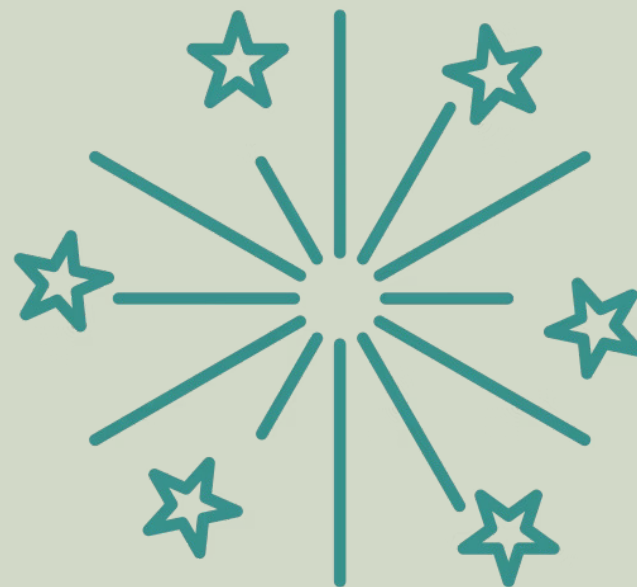

Gefeliciteerd, u heeft zojuist uw
eerste bewoner aangemaakt!

Stap 3

Licht & Geluid Instellen





Lichtinstellingen

Hier leer je hoe je de verlichtingstoepassingen van Nobi instelt.



Automatisch Licht

Bij het betreden van een kamer gaat het licht automatisch aan.

Bij het verlaten van een kamer gaat het licht na enkele seconden automatisch uit.



Lichtinstellingen

Stel de **lichtintensiteit** en de '**kleur**' (warm/koud) van de lampen in.

Het wijzigen van deze instellingen beïnvloedt het circadiaanse ritme van de verlichting.

[Geautomatiseerd licht inste...](#)

[Intensiteit instel...](#)

[Kleur instel...](#)



Geluid instellen



Stem na een val

In het geval van een val zal Nobi's stem de bewoner vragen de val te bevestigen.

Deze functie wordt niet aanbevolen voor bewoners met cognitieve beperkingen.



Ochtendbegroeting

Een ochtendbegroeting (datum, temperatuur, etc.) biedt dagelijkse structuur en maakt bewoners vertrouwd met Nobi's stem.

Deze functie wordt niet aanbevolen voor bewoners met cognitieve beperkingen.



Luidspreker Volume

Stel het volume van Nobi's luidspreker in

Stem na val

Ochtendbegroeting

Luidspreker Volume

Stap 4

Escalatieprocedure: configureren & verwerken



Escalatieprocedure

Wanneer **Nobi een val detecteert** of wanneer de bewoner op de **panieknop drukt**, activeert Nobi de escalatieprocedure. Nobi waarschuwt vervolgens het zorgpersoneel zodat zij onmiddellijk hulp kunnen bieden.



Nobi detecteert een val en start een escalatie



Nobi waarschuwt zorgverleners



Hulp wordt geboden



Zorgverlener sluit de escalatie af



De zorgverlener deelt de oorzaak van de val

Nobi waarschuwt je

Zorginstellingen kunnen kiezen via welke kanalen Nobi zorgverleners moet waarschuwen na een val of wanneer de panieknop wordt ingedrukt. Naast meldingen op het Nobi Dashboard zijn de volgende opties beschikbaar:

Verplicht



Telefoon

Nobi belt opgegeven nummers in cascade



Oproepsysteem

De manier waarop een val wordt gemeld, hangt af van het betreffende oproepsysteem.

Optioneel



App

Meldingen worden gelijktijdig naar alle gebruikers in de app verzonden



E-mail

E-mails worden gelijktijdig naar alle contacten verzonden

[Escalatieprocedure instellen](#)

2. Een escalatie sluiten

Na het helpen van een bewoner, is het belangrijk om de escalatie onmiddellijk te sluiten. Zo weten Nobi en je team dat de noodsituatie voorbij is.

Een escalatie kan op 4 manieren worden gesloten:



Snooze knop

Hoe?

1. Druk op de '**Snooze knop**' in de wooneenheid van de bewoner.
2. Dit sluit de escalatie onmiddellijk, en Nobi wordt 15 minuten gesnoozed.



Dashboard Nobi App

Hoe?

Ga naar het Nobi dashboard en klik op de openstaande val. Klik vervolgens op '**Escalatie sluiten**'



Oproepsysteem

Hoe?

Sluit de val via het bekende **oproepsysteem**




Nobi sluit automatisch

Hoe?

Wanneer een escalatie is bevestigd, kan Nobi de escalatie automatisch sluiten als Nobi geen val meer detecteert.

3. Oorzaak van de val

Nadat de bewoner is geholpen en de escalatie is afgesloten, kan de zorgverlener de oorzaak van de val invoeren voor toekomstige rapportage. Dit kan via het dashboard van de Nobi app.

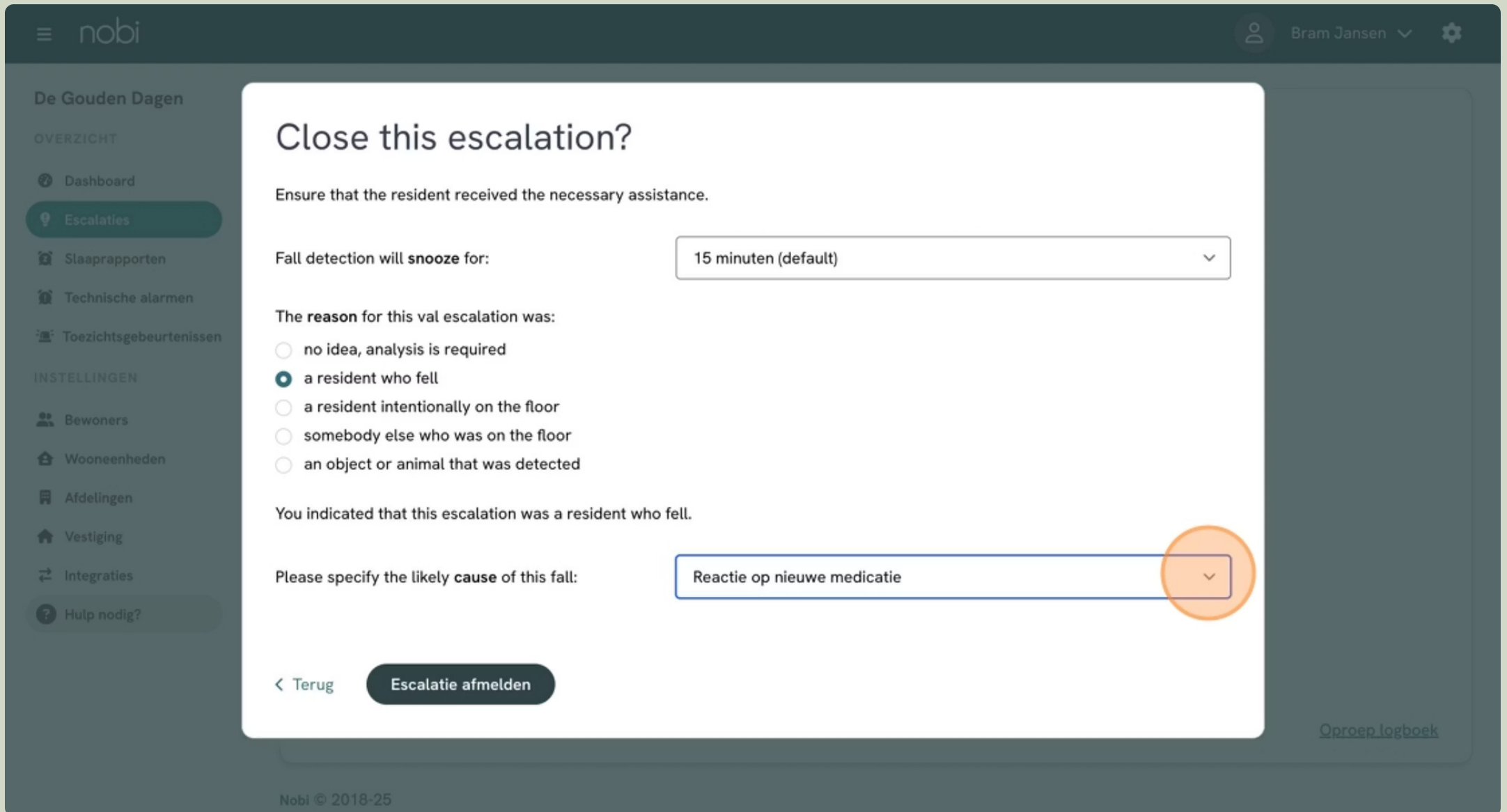

The screenshot shows the Nobi app interface. On the left is a sidebar with navigation options: 'De Gouden Dagen', 'OVERZICHT', 'Dashboard', 'Escalaties' (highlighted), 'Slaaprapporten', 'Technische alarmen', 'Toezichtsgebeurtenissen', 'INSTELLINGEN', 'Bewoners', 'Wooneenheden', 'Afdelingen', 'Vestiging', 'Integraties', and 'Hulp nodig?'. The main content area is titled 'Close this escalation?' and includes instructions to ensure the resident received necessary assistance. It features a dropdown for 'Fall detection will snooze for:' set to '15 minuten (default)'. Below this, a section titled 'The reason for this val escalation was:' lists five radio button options: 'no idea, analysis is required', 'a resident who fell' (selected), 'a resident intentionally on the floor', 'somebody else who was on the floor', and 'an object or animal that was detected'. A confirmation message states 'You indicated that this escalation was a resident who fell.' Another dropdown for 'Please specify the likely cause of this fall:' is set to 'Reactie op nieuwe medicatie', which is highlighted with an orange circle. At the bottom left are links for '< Terug' and 'Escalatie afmelden'. At the bottom right is a link for 'Oproep logboek'. The footer shows 'Nobi © 2018-25'.

nobi

Bram Jansen

De Gouden Dagen

OVERZICHT

Dashboard

Escalaties

Slaaprapporten

Technische alarmen

Toezichtsgebeurtenissen

INSTELLINGEN

Bewoners

Wooneenheden

Afdelingen

Vestiging

Integraties

Hulp nodig?

Close this escalation?

Ensure that the resident received the necessary assistance.

Fall detection will snooze for: 15 minuten (default)

The **reason** for this val escalation was:

- ☐ no idea, analysis is required
- ☒ a resident who fell
- ☐ a resident intentionally on the floor
- ☐ somebody else who was on the floor
- ☐ an object or animal that was detected

You indicated that this escalation was a resident who fell.

Please specify the likely **cause** of this fall: Reactie op nieuwe medicatie

< Terug Escalatie afmelden

Oproep logboek

Nobi © 2018-25

Gebeurtenissen monitoren

1. Nobi kan individuele risicovolle gebeurtenissen monitoren, zoals:



Bewoner op de rand van het bed



Bewoner in de badkamer



Bewoner uit bed



Geen bewoner gedetecteerd

2. Daarna kan Nobi:



Een rapport opstellen

Rapport van wat er is gebeurd en wanneer



U waarschuwen zodra het gebeurt

Mobiele melding / Dashboard

Deze kunnen sterk worden aangepast aan de behoeften van de bewoner



Actie vereist: Controleer of meldingen zijn ingeschakeld op alle mobiele apparaten van het personeel om deze belangrijke waarschuwingen te ontvangen.





Stap 5

Voeg Randapparatuur Toe

Randapparatuur toevoegen

Eenvoudig koppelen met Nobi

Ontgrendel het volledige potentieel van Nobi door randapparatuur naadloos te koppelen met de Nobi(ta) lampen.

[Bekijk alle randapparatuur](#)

[Hoe randapparatuur te koppelen](#)

Stap 6

Technische meldingen



Technische waarschuwingen

Technische waarschuwingen instellen



Ontvang direct updates over technische problemen met het apparaat. Stel eenvoudig waarschuwingen in om e-mailmeldingen te ontvangen wanneer er een storing is, zodat u op de hoogte blijft en de controle behoudt.

Zodra er technisch iets misgaat, zorgt Nobi ervoor dat zijn gebruikers worden geïnformeerd.

Waarschuwingen instellen

Overzicht van technische waarschuwingen



Vind uw weg naar ondersteuning

Aarzel niet om contact op te nemen - ons supportteam staat klaar om ervoor te zorgen dat u alles hebt wat nodig is om uitstekende bewonerszorg te bieden!



Knop Hulp Nodig

Snelle toegang tot hulp direct binnen de app-interface



Help Artikelen

Blader door uitgebreide gidsen en probleemoplossende bronnen na het inloggen



Supportaanvragen

Stuur gedetailleerde vragen of problemen in voor assistentie (support@nobi.life)



Mijn Aanvragen Volgen

Volg de status van eerdere supporttickets en reacties



Wilt u op de hoogte blijven?

In-App Berichten

Ontvang berichten over nieuwe functies en systeemverbeteringen direct via de applicatie-interface.



Welcome to **Nobi!**

Training & onboarding

Klantenportaal

Om ervoor te zorgen dat het onboardingproces met onze klanten zo soepel mogelijk verloopt, verzamelt Nobi alle trainingsmodules, nuttige referentiedocumenten en ondersteunende tools in een centraal klantportaal.

Wilt u deze presentatie of eerdere presentaties downloaden voor een collega of zelf opnieuw lezen?

[Ga naar het Klantenportaal](#)

Wat is het volgende?





AI leerperiode

- Nobi test camera, signaal en internet
- Nobi wordt getraind om vallen nauwkeurig te detecteren

1

Leerperiode activeren

Gebeurt **automatisch** wanneer u een bewoner koppelt aan een wooneenheid en **slimme monitoring** hebt geactiveerd

2

Valdetectietraining

Training voor personeel met een valsimulatie aan het einde

3

Nobi gaat live

Wanneer iedereen is geïnformeerd, spreken we een datum af om live te gaan. Vanaf dat moment is de escalatieprocedure actief en wordt u gewaarschuwd bij vallen.

Wat is het volgende?

Van initieel contact tot volledige systeemwerking, hier is het traject om Nobi in uw faciliteit te integreren.



**Bedankt voor uw aandacht
hou je goed!**



www.nobi.life